

# Návod na používání a dezinfekci ochranné roušky pro opakované použití

## Popis výrobku

- ochranná rouška slouží k ochraně uživatele před vniknutím virů a bakterií a zároveň napomáhá k ochraně před únikem těchto nebezpečných částic do okolí. Použitá nanotextilie je extrémně hustá, složená z velmi jemných vláken, která jsou 1000krát tenčí než lidský vlas. Díky tomu zachytí i nejmenší viry a bakterie a disponuje ochranou jako respirátory FFP2.

## Použitý materiál

- netkaná textilie-polyester / nanovrstva / netkaná textilie-polyester

## Návod k použití roušky

- v horní části roušky se nachází stahovací drátek, který důkladně vytvarujeme podle kořene nosu.



## Doporučená doba používání

- Celková doba používání (nošení) je individuální, záleží na vykonávané činnosti a době, kdy dochází při vydechování k zvlhčení roušky. U běžného nárazového použití pro občany není životnost zásadně omezená. **U exponovaných profesí, kde se předpokládá dlouhodobé použití po celou dobu směny, se jedná o jednorázovou ochrannou pomůcku na max. 1 pracovní směnu.** V průběhu, mezi jednotlivým nošením, roušku pravidelně dezinfikujte. Před a během používání se na povrch roušky z hygienických důvodů nedoporučuje sahat!
- Manipulace a úchyt roušky pouze za boční stahovací gumičky!

## Možnosti dezinfekce

- Abychom mohli roušku použít opakovaně, doporučuje se dezinfekce těmito způsoby:

### 1. Žehlení

- Přežehlení při teplotě 110 °C (nepoužívat páru) po dobu 30 vteřin.




### 2. Horkovzdušná trouba

- Roušku vložíme do předehřáté trouby na 110 °C po dobu 5 minut.

### 3. Dezinfekční prostředek

- Před opakovaným použitím ošetříme roušku dezinfekčním postřikem.



**Zákaz praní!** 

**„MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!“**

**Úspěšný boj s COVID-19 přeje společnost DEVA F-M. s. r. o.**

